



Brugervejledning

Ankelprotese (AD protese)

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse



Indledning

Denne pjeces er en skriftlig vejledning om din nye ankelprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ankelprotesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Ankelprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Ankelprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel samt optage kropstydningen og muliggøre forflytning.

› Indikation

Amputation gennem ankelleddet der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning eller traume

› Materialer

Ankelprotesen består af en protesefod og hylster eller en kombination af disse. Protesen kan sidde fast ved hjælp af vakuum eller ved hold oven over ankelleddet.

Ankelprotesen kan være fremstillet af silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Protesefødder fås i mange variationer og materialer, og vælges ud fra brugerens aktivitetsniveau, højde og drøjde.

› Holdbarhed/levetid for varige hjælpemidler

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til omkring seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Det er vigtigt at vaske huden og smøre den ind hver dag. Vask stumpen med en mild, flydende sæbe, som er pH-balanceret og 100 % fri for parfume og farvestoffer. Skyl stumpen omhyggeligt med vand og tør den med et rent håndklæde. Stumpen smøres ind i hudcreme for at tilføre huden fugt og blødgøre den. Hudcremen skal være pH-balanceret, 100 % fri for parfume og farvestoffer. Stumpen kan med fordel smøres ind om aftenen, når protesen tages af, på den måde får cremen tid til at virke.

Sørg for der altid går mindst et par timer efter indsmøring, før protesen tages på, hvis det gøres i dagtimerne. Undgå deodorant, parfume, spray, der indeholder alkohol, eller peelende cremer, da disse kan irritere huden.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen, og pasformen på din ankelprotese kan derfor forventes forringet - specielt de første 18 måneder efter amputationen.

Visse typer medicin og sygdomme kan også påvir-



ke kroppens væskebalance og volumen og dermed påvirke ankelprotesens pasform.

Vi opfordrer dig derfor altid til at henvende dig til Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at ankelprotesens pasform er forringet.

› Særlige risici

Ved tryksår og hudgener skal du kontakte Sahva hurtigst muligt. Ankelprotesen må ikke benyttes i vand, hvis den ikke er særligt fremstillet til det. En protese til brug i vand kaldes for hygiejneprotese/badeprotese. Udsæt ikke ankelprotesen for høje temperaturer (sauna, stærk sol eller tørring i ovn), da det kan ødelægge protesens funktion og influere på pasformen. Hvis du har føleforstyrrelser (neuropati) i stumpen, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener/mærker. Vi opfordrer dig til at undersøge stumpen flere gange dagligt ved hjælp af et spejl.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring og vedligeholdelse

Gør ankelprotesen ren hver aften med en fugtig klud - og eventuelt uparfumeret sæbe - og lad den lufte i løbet af natten. En gang om ugen tørres ankelprotesen af med husholdningssprit.

Såfremt du har en ankelprotese, som kræver stumpstrømpe, skal du tage rene stumpstrømper på hver dag. Stumpstrømperne skal vaskes i mild sæbe. Nye stumpstrømper udleveres hos bandagisten.

› Bortskaffelse/returnering

Når ankelprotesen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning

- dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.