



Brugervejledning

Delfodsprotese – PF protese

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse



Indledning

Denne pjeces er en skriftlig vejledning om din nye PF protese (delfodsprotese), som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af PF protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen af protesen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Delfodsprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Delfodsprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel samt muliggøre forflytning.

› Indikation

Amputation af forfoden, der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning eller traume.

› Materialer

Delfodsprotesen består af en protesefod med integreret hylster og kan være fastgjort på forskellige måder. Fastgørelsen (suspensionen) kan være ved

hjælp af vakuum eller ved hold oven over hælen/achillessenen. Delfodsprotesen kan være fremstillet af silikone, laminat, kulfiber; eller en kombination af disse.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til omkring seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Det er vigtigt, at vaske huden og smøre den ind hver dag. Vask stumpen med en mild, flydende sæbe, som er pH-balanceret og 100 % fri for parfume og farvestoffer. Skyl stumpen omhyggeligt med vand, og tør den med et rent håndklæde. Stumpen smøres ind i hudcreme for at tilføre huden fugt og blødgøre den. Hudcremen skal være pH-balanceret og 100 % fri for parfume og farvestoffer. Stumpen kan med fordel smøres ind om aftenen, når protesen tages af. På den måde får cremen tid til at virke. Sørg for at der altid går mindst et par timer efter indsmøring, hvis det gøres i dagtimerne, før protesen tages på. Undgå deodorant, parfume, spray, der indeholder alkohol, eller peelende cremer, da disse kan irritere huden.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen, og pasformen på din delfodsprotese kan derfor forventes forringet; specielt de første atten måneder efter amputationen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre delprotesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.



› Særlige risici

Ved tryksår og hudgener skal du kontakte Sahva hurtigst muligt. Delfodsprotesen må ikke benyttes i vand, hvis den ikke er særligt fremstillet til det. Protoser beregnet til brug i vand kaldes for hygiejne-protese/badeprotese. Udsæt ikke delfodsprotesen for høje temperaturer (sauna, stærk sol eller tørring i ovn), da det kan ødelægge protesens funktion og influere på pasformen. Hvis du har føleforstyrrelser (neuropati) i stumpen, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener/mærker. Vi opfordrer dig til at undersøge stumpen flere gange dagligt ved hjælp af et spejl.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Gør delfodsprotesen ren hver aften med en fugtig klud, og eventuelt uparfumeret sæbe, og lad den lufte i løbet af natten. En gang om ugen tørres delfodsprotesen af med husholdningssprit. Såfremt du har en delfodsprotese, som kræver stumpstrømpe, skal du tage rene stumpstrømper på hver dag. Stumpstrømperne skal vaskes i mild sæbe. Nye stumpstrømperne udleveres hos bandagisten.

› Vedligeholdelse

Sørg for god hygiejne på delfodsprotesen og dens dele.

› Bortskaffelse/returnering

Når delfodsprotesen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres eller sendes til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt reparation/fornyelse af dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.